

## Die praktische Einhand-Bedienhilfe – weil Eltern nur zwei Hände haben



Die patentierte Einhand-Bedienhilfe ermöglicht es, die VORTEX mit einer Hand anzuwenden und das Dosieraerosol auszulösen. So können Sie Ihr Kind während der Inhalation sicher halten – für den Therapieerfolg bei der Inhalation mit Babys.

## Anwendung der VORTEX® im Video einfach erklärt



## VORTEX® – perfekt für Kinder jeden Alters



VORTEX mit Babymaske und Einhand-Bedienhilfe



VORTEX mit Kindermaske




VORTEX mit Mundstück

## VORTEX® Baby- und Kindermasken – extra komfortabel und effizient

- **Angenehmer Tragekomfort** – für eine hohe Akzeptanz und eine stressfreie Anwendung für Kind und Eltern
- **Effiziente Inhalation** – der weiche Maskenrand schließt dicht bei geringem Anpressdruck
- **Kinderleichte Hygiene** – auskochbar, sterilisierbar und spülmaschinenfest



PARI GmbH, Moosstraße 3, 82319 Starnberg, GERMANY  
E-Mail: info@pari.de, Tel.: +49 (0)8151 279 0, www.pari.com

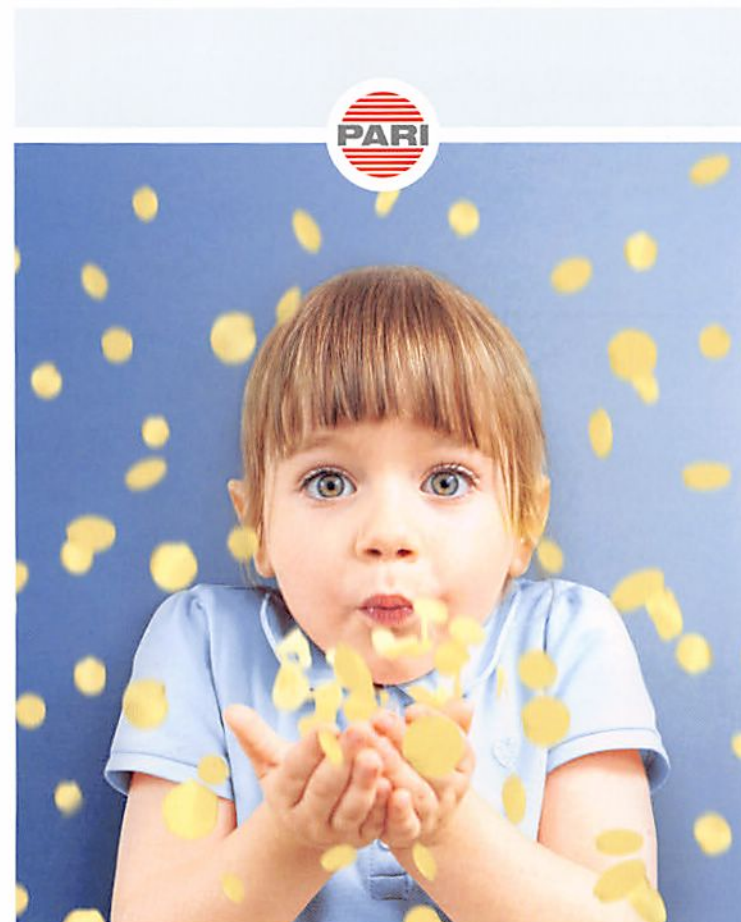

## VORTEX®

Vorschalten. Abatmen. Aufatmen.

### KURZANLEITUNG



www.pari.com

## So einfach geht's: Aufbau & Inhalation mit... ... Mundstück



Spray-Kappe entfernen,  
kräftig schütteln



Spray hinten in die VORTEX  
stecken



VORTEX-Kappe entfernen



Mundstück zwischen die  
Zähne nehmen und mit  
Lippen umschließen



Spray auslösen



Tief und langsam ein- und  
ausatmen

**Bei mehreren Sprühstößen pro Anwendung:**  
Schritt 5 und 6 wiederholen

**0–18 Monate:** 4–6 Atemzüge, **> 18 Monate:** 2–4 Atemzüge

## ... Babymaske und Einhand-Bedienhilfe



Spray-Kappe entfernen,  
kräftig schütteln



Einhand-Bedienhilfe über die  
Kammer schieben



Spray in den Anschlussring  
stecken und die Einhand-  
Bedienhilfe einklicken



Kappe entfernen und Maske  
aufstecken



Maske dicht über Mund und  
Nase legen



Spray auslösen, tief und  
langsam ein- und ausatmen

**Bei mehreren Sprühstößen pro Anwendung:**  
Schritt 6 wiederholen

**0–18 Monate:** 4–6 Atemzüge, **> 18 Monate:** 2–4 Atemzüge

## Reinigen

## Desinfizieren



VORTEX  
auseinanderbauen



Reinigung in warmen Wasser  
mit Spülmittel, mit klarem  
Wasser abwaschen



Auskochen,  
**5 Minuten**



Trocknen lassen



**Alternativ:**  
In Spülmaschine einräumen,  
Programm mit **min. 50°C** wählen



**Alternativ:**  
Desinfektion im Baby-  
flaschen Vaporisator